

## BasicNature Wärmekissen 'Magic Heat'

### Anleitung

Das wiederverwendbare Wärmekissen 'Magic Heat' wurde in Zusammenarbeit mit Athleten, Trainern und Ärzten entwickelt. Es ermöglicht - neben dem Einsatz als Handwärmer und Wärmekissen - die punktgenaue Behandlung von Muskelzerrungen, Rückenschmerzen und Unterkühlung. Seine Tiefenwärme hilft nahezu überall. Das Wärmekissen benötigt keine Elektrizität und keine Vorwärmung.

Durch Druck auf den Metallknopf im Kissen erhitzt sich 'Magic Heat' in Sekunden auf bis zu 55°C. Bei richtiger Anwendung (die Kissen sind naturgemäß gegen mechanische Beanspruchung etwas empfindlich) immer wieder verwendbar - bis zu einigen hundert Mal. Findet Anwendung bei allen Outdooraktivitäten, in Freizeit, Sport und Therapie.

### Aktivierung

Die Wärme wird in dem Kissen durch Kristallisationsprozesse gespeichert und durch einen Druck auf den Metallknopf im Kissen langsam wieder abgegeben. Das Kissen ist einsatzbereit, wenn der Inhalt flüssig ist. Nehmen Sie dann den Metallknopf zwischen Daumen und Zeigefinger und drücken Sie den Knopf zügig, bis er knackt. Die Kristallisation beginnt. Das Kissen wird warm.

### Wiederaufbereitung

Zur erneuten Benutzung wird das Gelkissen in einem Tuch verpackt (denn es darf nicht den Topfboden berühren) und mit kochendem Wasser wieder ‚aufgeladen‘. Nach 15 -20 Minuten im kochenden Wasser verflüssigt sich der Inhalt des Kissens wieder. Kontrollieren Sie es auf feste Bestandteile. Falls noch welche vorhanden sind, schütteln Sie das Kissen 15 Sekunden und legen es dann nochmals 3 Minuten zurück ins kochende Wasser.

### Warnhinweise

- Benutzen Sie das Kissen nicht direkt nach der Wiederaufbereitung! Es ist sehr heiß und kann Verbrennungen verursachen. Das Kissen muss zuerst abkühlen.
- Beaufsichtigen Sie gewissenhaft den Gebrauch des Kissens durch Kinder, Kranke oder Personen mit empfindlicher Haut!
- Öffnen Sie 'Magic Heat' nicht! Sollte Flüssigkeit austreten, nehmen Sie diese nicht zu sich und achten Sie darauf, dass weder Haut noch Augen damit in Berührung kommen. Sollte dies geschehen, suchen Sie einen Arzt auf.
- Legen Sie das Kissen nicht direkt auf die Haut von Personen mit Kreislaufproblemen oder Überempfindlichkeit. Konsultieren Sie hierzu vorher einen Arzt.
- Halten Sie 'Magic Heat' außer Reichweite von Kindern.